

Reach R-Li Reach R-Li T

NAUDOTOJO VADOVAS



Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

REXTON

TURINYS

Sveiki!	4
Jūsų klausos aparatai	5
Klausos aparato tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	6
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	7
Valdikliai	9
Klausos programos	10
Funkcijos	10
Kasdienis naudojimas	11
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	12
Ijungimas ir išjungimas	17
Budėjimo režimo įjungimas	19
Garsumo reguliavimas	20
Klausos programos keitimas	21
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	21
Iškrovimas	22
Ypatingos klausymosi sąlygos	25
Kalbant telefonu	25
Garso transliacija naudojant „iPhone“	26
Garso transliacija naudojant „Android“ telefoną	26
„Bluetooth“	27
Garso indukcinės kilpos (tik Reach R-Li T)	27

Techninė priežiūra ir aptarnavimas	28
Klausos aparatai	28
Į ausį kišamos dalys	30
Specialistų atliekama techninė priežiūra	32
Svarbi informacija apie saugą	33
Tolesnė informacija	36
Priedai	36
Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos	36
Informacija apie prietaiso išmetimą	38
Šiame dokumente naudojami simboliai	38
Klausos aparato trikčių diagnostika	40
Su šalimi susijusi informacija	42
Techninė priežiūra ir garantija	43

SVEIKI!

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokią kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos priežiūros specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



Prietaisas gali atrodyti ne visai taip, kaip pavaizduota šių instrukcijų pavyzdinėse iliustracijose. Pasilieiname teisę atlikti bet kokius mūsų manymu būtinus pakeitimus.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.



Prieš pirmą kartą naudodami klausos aparatus, juos visiškai įkraukite. Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais.

JŪSŲ KLAUSOS APARATAI



Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

KLAUSOS APARATO TIPAS

Jūsų klausos aparatai yra su RIC (Receiver-in-Canal) imtuvu. Imtuvas yra įdedamas į ausies kanalą ir sujungiamas su klausos aparatu imtuvo laidu. Klausos aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Į klausos aparatą yra įmontuotas neišimamas maitinimo elementas (įkraunama ličio jonų baterija). Dėl to prietaisą paprasta įkrauti naudojant Charging Station R arba pasirinktinį Travel Charger RIC ar Charging+ Station R.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologines funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

Jūsų klausos aparatų funkcijos Bluetooth® Low Energy* technologija, leidžianti keistis duomenimis naudojant išmanųjį telefoną ir sklandžiai transliuoti garsą naudojant iPhone** ir kai kuriems „Android“ išmaniesiems telefonams, kuriuose palaikoma technologija „Audio Streaming for Hearing Aids“ (ASHA).

SUSIPAŽINIMAS SU KLAUSOS APARATU

Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami klausos aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir įsidėmėkite, kurioje klausos aparato vietoje jie yra. Tada, nešiodami klausos aparatą, galėsite lengviau apčiuopti ir paspausti valdiklius.


i

Jeigu įsidėjęs klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, galite pasiteirauti klausos specialisto, ar klausos aparatą galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle.

* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks tokių „WS Audiology Denmark A/S“ ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

** „iPad“, „iPhone“ ir „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

SUDEDAMOSIOS DALYS IR PAVADINIMAI

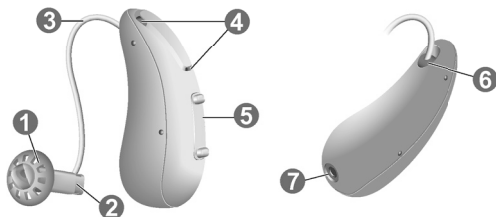

➊ Į ausį kišama dalis

➋ Imtuvas

➌ Imtuvo laidas

➍ Mikrofono angos

➎ Klavišinis jungiklis (valdymas, įjungimo / išjungimo jungiklis)

➏ Pusės indikatorius (raudonas = dešinioji ausis, mėlynas = kairioji ausis) ir imtuvo jungtis

➐ Įkrovimo kontaktai

Galite naudoti toliau išvardytas standartines į ausį kišamas dalis.

Standartinės į ausį kišamos dalys		Dydis
		Sleeve 3.0 Vented/Closed/Power
		Eartip 3.0 Open
		Eartip 3.0 Tulip

Standartinės į ausį kišamas dalis galite lengvai pakeisti. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys	
	 Ausies įdėklas 3,0

VALDIKLIAI

Naudodami klavišinį jungiklį galite, pvz., perjungti klausymosi programas. Klausos specialistas užprogramavo klavišiniam jungikliui jūsų pageidautas funkcijas.

Klavišinio jungiklio funkcijos	L	R
Paspauskite trumpai:		
Programa aukštyn / žemyn	☐	☐
Garsumo didinimas / mažinimas	☐	☐
Spengimo ausyse funkcijos didinimas / mažinimas	☐	☐
TV transliacija įjungta / išjungta	☐	☐
Palaikykite paspaudę maždaug 2 sekundes:		
Programa aukštyn / žemyn	☐	☐
Garsumo didinimas / mažinimas	☐	☐
Spengimo ausyse funkcijos didinimas / mažinimas	☐	☐
TV transliacija įjungta / išjungta	☐	☐
Spauskite apatinį mygtuką ilgiau nei 3 sekundes:		
Įjungimas / išjungimas	✓	✓

L = į kairę, R = į dešinę

i

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį girdėjimo programoms keisti ir klausos aparato garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

KLAUSOS PROGRAMOS

1

2

3

4

5

6

Daugiau informacijos žr. skyriuje
„Klausos programos keitimas“.

FUNKCIJOS



Pasirinkus funkciją **įjungimo delsa**, dedant klausos aparatus į ausį negirdimi švilpimo garsai.

Daugiau informacijos žr. skyriuje
„Įjungimas ir išjungimas“.



Ūžesio šalinimo funkcija sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Kad klausos aparatais būtų patogų ir paprastą naudotis, jie turi integruotą valdymo elementą.

Be to, siūlome „Android“ ir „iPhone“ programėles, kuri leidžia dar lengviau valdyti įrenginius. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti išmaniojo telefono programėlę, kreipkitės į savo klausos specialistą.

KLAUSOS APARATŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:


- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.




Klausos aparato įdėjimas:

- Naudodami Sleeves pasirinkite, kad Sleeve sulenkimas sutaptų su imtuvo laido sulenkimu. Žr. tolesnes iliustracijas.

Teisingai:

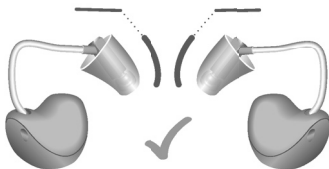

Neteisingai:

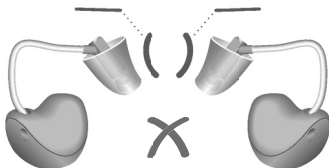


- ▶ Laikykite imtuvo laidą už linkio arčiau į ausį kišamos dalies.

- ▶ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ❶.

- ▶ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkeltkite virš viršutinės ausies dalies ❷.

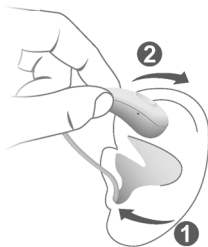

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Imtuvo laidą visada naudokite su ausies antgaliu.
- ▶ Įsitikinkite, kad į ausį kišama dalis yra gerai pritvirtinta.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.

i

- Gali būti patogiau **dešiniąjį** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairįjį** – **kairiąja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.

Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Kaip pritvirtinti pasirinktinę prilaikymo juostelę:

CONCHA LOCK SLEEVE 3.0

- Sulygiuokite Concha Lock Sleeve 3.0 su imtuvu, kaip parodyta paveikslėlyje. Tada užmaukite Concha Lock Sleeve 3.0 ant imtuvo, kad patikimai laikytųsi.



KRIAUKLINIS FIKSATORIUS 3.0

- Sulygiuokite prilaikymo juostelės galą su plokščiuoju imtuvo galu.



- Tada spauskite prilaikymo juostelę link imtuvo, kol ji spragtelės ir užsifiksuos.




Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies įdubos dugną (žr. paveikslėlyje).



Klausos aparato išėmimas:

- Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ①.
- Jeigu naudojate klausos aparatą su pritaikytu įdėklu arba forma, jį arba ją išimkite traukdami link pakaušio už mažo išimti skirto laidelio.
- Naudodami bet kokias kitas į ausį kišamas dalis: Ausies kanale esantį imtuvą suimkite dviem pirštais ir atsargiai ištraukite ②.

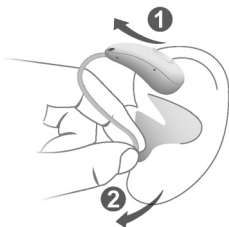

Netraukite imtuvo laido.



PERSPĒJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir nudžiovinkite. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Įkrovikliu:

- ▶ Įjungimas: išimkite klausos aparatus iš įkroviklio.
Jūsų klausos aparate leidžiama paleidimo melodija. Nustatomas **numatytasis** garsumas ir girdėjimo programa.
- ▶ Išjungimas: klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

Atminkite, kad įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Daugiau informacijos rasite įkroviklio naudotojo vadove.

Naudojant klavišinį jungiklį:

- Įjungimas: Nuspaudę laikykite klavišinio jungiklio apatinę dalį, kol pradės groti paleidimo melodija. Kol melodija groja, atleiskite klavišinį jungiklį.



Nustatomas **numatytasis** garsumas ir girdėjimo programa.

- Išjungimas: Kelias sekundes palaikykite nuspaustą apatinę klavišinio jungiklio dalį. Pradės groti išjungimo melodija.



Aktyvavus funkciją **Power-on delay** (įjungimo delsa), klausos aparatai įsijungia tik po kelių sekundžių. Per tą laiką galite dėti klausos aparatus į ausis negirdėdami nemalonaus švilpimo garso.

Funkciją „Power-on delay“ (įjungimo delsa) gali sukonfigūruoti klausos specialistas.

BUDĖJIMO REŽIMO ĮJUNGIMAS

Nuotolinio valdymo pulteliu klausos aparatus galite perjungti į budėjimo režimą. Taip klausos aparatai nutildomi. Išėjus iš budėjimo režimo, nustatomas **anksčiau** naudotas garsumas ir girdėjimo programa.

Pastaba:

- Veikiant budėjimo režimui, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungti. Jie vartoja šiek tiek energijos.
Todėl budėjimo režimą rekomenduojame naudoti tik trumpai.
- Jei norite išeiti iš budėjimo režimo, bet nuotolinio valdymo pultelio neturite po ranka: Klausos aparatus išjunkite ir vėl įjunkite (klavišiniu jungikliu arba trumpam įdėdami į įkroviklį, kol pradės šviesti viena ar daugiau LED lempučių). Tokiu atveju nustatomas **numatytasis** garsumas ir girdėjimo programa.

GARSUMO REGULIAVIMAS

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- Jei norite reguliuoti garsą patys, paspauskite viršutinę klavišinio jungiklio dalį, kad pagarsintumėte, arba apatinę, kad patylintumėte.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

KLAUSOS PROGRAMOS KEITIMAS

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- Jei norite pakeisti klausos programą, trumpai paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

KITI REGULIUOJAMI NUSTATYMAI (PASIRINKTINAI)

Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užesio funkcijos lygiui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

ĮKROVIMAS

Galite rinktis tris skirtingus įkroviklius:



1 Charging Station R

3 Charging+ Station R

2 Travel Charger RIC

- Klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.
- Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais. Įkroviklio naudotojo vadove taip pat galite rasti naudingų krovimo patarimų.



Prieš dėdami klausos aparatą į įkroviklį, nuvalykite klausos aparato įkrovimo kontaktus. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

PRANEŠIMAS APIE MAŽĄ ENERGIJOS KIEKĮ

Girdėsite įspėjamąjį signalą, nurodantį, kad maitinimo elementas baigia išsieikvoti. Signalas bus kartojamas kas 15–30 minučių, atsižvelgiant į jūsų nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kaip naudojate klausos aparatus, jiems įkrauti turite maždaug 1,5 val. – po to jie nustos veikti.

Turėkite omenyje, kad maitinimo elementas veikia trumpiau, jei vienu metu naudojama daug funkcijų.

KROVIMO PATARIMAI

Jums gali kilti klausimų, kaip geriausia krauti klausos aparatus. Perskaitykite toliau pateiktus klausimus ir atsakymus. Jei turite daugiau klausimų, jums padės klausos priežiūros specialistas.



Kaip dažnai reikia krauti klausos aparatus?

Rekomenduojame klausos aparatus krauti kasdien, net jei maitinimo elementas nėra išsikrovęs. Juos kraukite per naktį – tada dieną tikrai pradėsite su visiškai įkrautais klausos aparatais.



Kiek laiko trunka krovimas?

Visiško įkrovimo ciklas trunka maždaug 4 valandas.

Po 30 minučių klausos aparatus galima naudoti iki 6 valandų.

Įkrovimo trukmė gali skirtis dėl klausos aparatų naudojimo ir maitinimo elemento amžiaus.



Kas nutinka, jei pamirštama įkrauti?

Kai išsikrauna maitinimo elementas, klausos aparatai automatiškai išsijungia. Kuo greičiau įkraukite klausos aparatus.

Daugiau nei 6 mėnesius nekrauti klausos aparatai gali sugesti dėl nepataisomo per didelio maitinimo elemento iškrovimo. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų įkrauti nebegalima ir juos reikia pakeisti.

YPATINGOS KLAUSYMOSI SĄLYGOS

KALBANT TELEFONU

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.



KALBĖJIMO TELEFONU PROGRAMA

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.

GARSO TRANSLIACIJA NAUDOJANT „IPHONE“

Jūsų klausos aparatai yra Made for iPhone klausos aparatai. Tai reiškia, kad naudodami klausos aparatus galite atsiliiepti į skambučius ir klausytis muzikos iš „iPhone“.

Be to, su klausos aparatu galite skambinti per suderinamus „iPhone“ ir „iPad“ prietaisus, nelaikydami jų rankose.

Norėdami daugiau informacijos apie su „iOS“ suderinamus prietaisus, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas kreipkitės į klausos specialistą.

GARSO TRANSLIACIJA NAUDOJANT „ANDROID“ TELEFONĄ

Jei jūsų mobilusis telefonas palaiko Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA), naudodami klausos aparatus galite atsiliiepti į skambučius ir klausytis muzikos iš savo mobiliojo telefono.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie su „Android“ suderinamus prietaisus, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas, kreipkitės į klausos specialistą.

„BLUETOOTH“

Jūsų klausos aparate įdiegta Bluetooth belaidė technologija, kad būtų galima įjungti srautinį garso perdavimą iš mobiliųjų telefonų ar kitų suderinamų įrenginių.

Lėktuve Bluetooth funkcionalumas gali būti apribotas, ypač lėktuvui kylant ir leidžiantis. Tokiu atveju galite išjungti klausos aparato Bluetooth belaidę technologiją naudodami išmaniojo telefono programėlę.

GARSO INDUKcinės KILPOS (TIK REACH R-LI T)

Kai kuriuose telefonuose ir viešosiose vietose, pvz., teatruose, galima garso signalo (muzikos arba kalbos) per garso indukcinę kilpą paslauga. Naudojant šią sistemą klausos aparatai tiesiogiai priima pageidaujamą signalą, bet aplinkos garsas neiškraipomas.

Jeigu naudojama garso indukcinės kilpos sistema, apie tai dažniausiai informuojama atitinkamais ženklais.



Kas kartą būdami vietoje, kur yra garso indukcinė kilpa:

- ▶ įjunkite teleritės programą.

Skyriuje „Girdėjimo programos“ nurodyta, ar teleritės programa sukonfigūruota jūsų klausos aparatui.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

KLAUSOS APARATAI

VALYMAS

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniai ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.
- ▶ Nevalykite įkrovimo kontaktų alkoholio pagrindo skiedikliu.
- ▶ Kad išvengtumėte korozijos naudokite minkštą ir sausą servetėlę prakaitui ar skysčiui nušluostyti nuo įkrovimo kontaktų arba klausos aparatų prieš įstatydami juos į įkroviklį.
- ▶ Kreipkitės į klausos specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiosios priežiūros rinkinių arba paieškokite išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti tinkamą klausos aparatų būklę.



DŽIOVINIMAS

Savo klausos aparatams džiovinti galite naudoti įprastus produktus. Dėl rekomenduojamų džiovinimo produktų ir asmeninių nurodymų, kada džiovinti klausos aparatus, kreipkitės į savo klausos specialistą.

LAIKYMAS

- Trumpalaikis laikymas nenaudojant (iki kelių dienų). Klausos aparatus išjunkite klavišiniu jungikliu arba įdėkite juos į įkroviklį, į kurį tiekama elektros energija.

Įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Jei įkroviklis prie maitinimo šaltinio neprijungtas ir į jį įdedate klausos aparatus, jie **neišjungiami**.

Atkreipkite dėmesį, kad kai klausos aparatus išjungiame nuotolinio valdymo pulteliu ar išmaniojo telefono programėle, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungiami. Jie veikia budėjimo režimu ir vis dar vartoja šiek tiek energijos.

- Ilgalaikis laikymas nenaudojant (savaites, mėnesius ir t. t.). Pirmiausia savo klausos aparatus visiškai įkraukite. Prieš palikdami nenaudojamą, išjunkite jį klavišiniu jungikliu. Klausos aparatus laikant nenaudojamus, rekomenduojame naudoti džiovinimo produktus.

Kas 6 mėnesius klausos aparatus reikia įkrauti, kad nepataisomai per daug neišsikrautų maitinimo elementas. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų krauti nebegalima ir juos reikia pakeisti. Krauti rekomenduojame dažniau nei kas 6 mėnesius.

Laikykitės laikymo sąlygų, nurodytų skyriuje „Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.

Į AUSĮ KIŠAMOS DALYS


VALYMAS

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

Naudodami bet kokio tipo į ausį kišamas dalis:

- Išėmę į ausį kišamas dalis, nedelsdami nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.


Taip ausų siera neprisidžius.

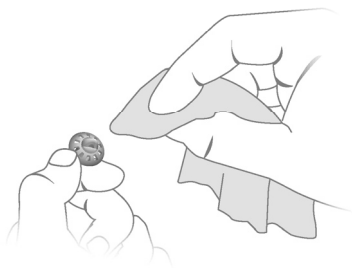


KEITIMAS

Standartines į ausį kišamas dalis keiskite maždaug kas tris mėnesius. Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, pakeiskite anksčiau. Standartinių į ausį kišamų dalių keitimo procedūra priklauso nuo į ausį kišamos dalies tipo. Skyriuje „Sudedamosios dalys ir pavadinimai“ jūsų klausos specialistas pažymėjo jūsų naudojamą į ausį kišamos dalies tipą.

- Norėdami nuimti seną į ausį kišamą antgalį arba Sleeve, vadovaukitės toliau pateikiama iliustracija. Saugokitės, kad netrauktumėte imtuvo laido.

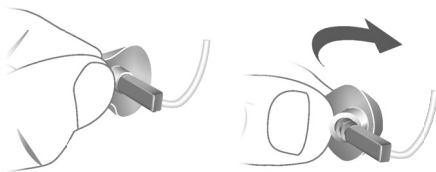

- Pasirūpinkite, kad naujas į ausį kišamas antgalis arba Sleeve visiškai padengtų imtuvo fiksuojamuosius žiedus.
- Patikrinkite, ar naujas į ausį kišamas antgalis arba Sleeve tvirtai užsifiksavo.

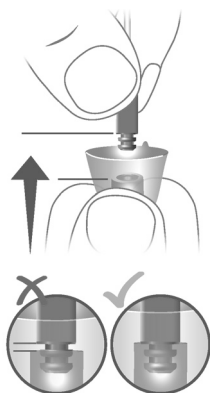

SPECIALISTŲ ATLIEKAMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis ir ausų sieros filtras prireikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų rekomendacijos jums dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ



ĮSPĖJIMAS

Į jūsų prietaisą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Netinkamai naudojant prietaisą, įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas gali sprogti.

Sužeidimo, gaisro arba sprogimo pavojus!

- Laikykitės šiame skyriuje pateiktų įkraunamų ličio jonų maitinimo elementų saugos nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- Prijunkite įkroviklį naudodami tik USB maitinimo šaltinį, atitinkantį IEC 60950-1 ir (arba) IEC 62368-1.



ĪSPĒJIMAS

- ▶ Laikīkitēs naudojimo sālīgū.
- ▶ Būkite itin atidūs ir prietaisā saugokite nuo didelio karščio (pvz., ugnies, mikrobangū krosnelēs, indukcinēs orkaitēs ir kitū didelēs indukcijos laukū) bei saulēs šviesos.
- ▶ Klausos aparatus kraukite tik patvirtintu įkrovikliu. Jei reikia pagalbos, kreipkitēs į klausos specialistā.
- ▶ Prietaiso neardykite.
- ▶ Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje.
- ▶ Nenaudokite deformuotū ar aiškai pažeistū prietaisū.
- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei jo veikimas po krovimo labai suprastēja. Grāžinkite prietaisā klausos specialistui.
- ▶ Neišmeskite prietaiso į ugnį arba vandenį.



ĮSPĖJIMAS

Keitimo ir remonto darbus turi atlikti specialistas.
Todėl:

- ▶ Neremontuokite ir nekeiskite įkraunamo ličio jonų maitinimo elemento patys.
- ▶ Kadangi mažai tikėtiniu atveju įkraunama ličio jonų baterija gali trūkti arba sprogti, visas degias medžiagas laikykite atokiau.

Visais pirmiau paminėtais atvejais grąžinkite prietaisą klausos priežiūros specialistui.

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.

TOLESNĖ INFORMACIJA

PRIEDAI

Galite naudoti išmanųjį telefoną, kad valdytumėte klausos aparatus nuotoliniu būdu (tai galima daugelyje šalių). Ši programėlė teikia galimybę reguliuoti klausos aparatus iš išmaniojo telefono ir netgi individualiai pritaikyti girdėjimo ypatybes.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos specialistą.

NAUDOJIMO, TRANSPORTAVIMO IR LAIKYMO SĄLYGOS

Klausos aparatai veikia toliau nurodytomis aplinkos sąlygomis (taip pat galioja tarp naudojimo ciklą).

Naudojimo sąlygos	Iškrovimas	Įkrovimas
Temperatūra	0–50 °C (32–122 °F)	10–35 °C (50–95 °F)
Santykinis drėgnis	5–93 %	5–93 %
Atmosferos slėgis	700– 1060 hPa	700– 1060 hPa

Jeigu transportavimas ir laikymas trunka ilgai, atsižvelkite į toliau nurodytas sąlygas.

	Laikymas	Transportavimas
Temperatūra (rekomenduojama)	10–25 °C (50–77 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Temperatūra (didžiausias diapazonas)	10–40 °C (50–104 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Santykinis drėgnis (rekomenduojama)	20–80 %	5–90 %
Santykinis drėgnis (didžiausias diapazonas)	10–80 %	5–90 %
Atmosferos slėgis	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Atminkite, kad klausos aparatus reikia įkrauti bent kas 6 mėnesius. Klausos aparatus rekomenduojame įkrauti kas 3 mėnesius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

Kitoms dalims, pvz., įkrovikliui, gali būti taikomos kitokios sąlygos.



ĮSPĖJIMAS

Pervežant atsiranda sužeidimo, gaisro arba sprogimo pavojus.

- ▶ Ličio baterijas ir klausos aparatus pervežkite laikydamiesi vietinių reikalavimų.

INFORMACIJA APIE PRIETAISO IŠMETIMĄ

- ▶ Kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite maitinimo elementų ar prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
- ▶ Pakuotes, maitinimo elementus ir prietaisus perdirbkite arba išmeskite laikydamiesi vietinių nuostatų.

ŠIAME DOKUMENTE NAUDOJAMI SIMBOLIAI

Simboliai ant prietaiso ar pakuotės



Nurodoma situacija, kai gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Ispėjama apie galimą žalą nuosavybei.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.



CE atitikties žyma, patvirtinanti tam tikrų Europos direktyvų atitiktį, žr. skyrių „Atitikties informacija“.



Nurodo teisėtą prietaiso gamintoją.

Made for

iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ ir „Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų atitiktį. Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio veikimą.

KLAUSOS APARATO TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Pagarsinkite.
 - Įkraukite klausos aparatą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
 - Pritildykite.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Garsas iškraipomas.

- Pritildykite.
 - Įkraukite klausos aparatą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Įkraukite klausos aparatą.
-

Problema ir galimi sprendimai

Klausos aparatas neveikia.

- Ijunkite klausos aparatą.
 - Įkraukite klausos aparatą. Taip pat stebėkite įkroviklio būsenos LED lemputes.
-

Klausos aparatas neįkraunamas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas įkroviklio maitinimo šaltinis.
 - Patikrinkite, ar klausos aparatas taisyklingai įdėtas į įkroviklį.
 - Nuvalykite klausos aparato įkrovimo kontaktus.
 - Nuvalykite įkroviklio įkrovimo kontaktus.
-

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į klausos specialistą.

SU ŠALIMI SUSIJUSI INFORMACIJA

JAV IR KANADA

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

REACH R-LI, REACH R-LI T

- HVIN: RFM003
- Yra FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Sudėtyje yra IC: 26428-RFM003

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA

Serijos numeriai

**Klausos
aparatas**

Imtuvo blokas

Kairė:

Dešinė:

Techninės priežiūros datos

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garantija

Išigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

Jūsų klausos specialistas

 **Teisėtas gamintojas**

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Danija

Document No. 05615-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 210 374 32

Master Rev01, 11.2023

www.wsaud.com

© 03.2024, WSAUD A/S. All rights reserved

www.rexton.com

CE
0123