

BiCore R312

NAUDOTOJO VADOVAS



Made for

🍏 iPhone | iPad | iPod

REXTON

TURINYS

Ižanga	4
Jūsų klausos aparatai	5
Prietaiso tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	6
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	7
Valdikliai	9
Klausos programos	10
Funkcijos	10
Maitinimo elementai	11
Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo	11
Elementų keitimas	12
Kasdienis naudojimas	14
Ijungimas ir išjungimas	14
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	17
Garsumo nustatymas	22
Klausos programos keitimas	23
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	23

Ypatingos klausymosi sąlygos	24
Kalbant telefonu	24
Garso transliacija naudojant „iPhone“	24
Garso transliacija naudojant „Android“ telefoną	25
Bluetooth	25
Techninis aptarnavimas ir priežiūra	26
Klausos aparatai	26
Į ausį kišamos dalys	27
Specialistų atliekama techninė priežiūra	28
Tolesnė informacija	30
Informacija saugos klausimais	30
Priedai	30
Trikčių diagnostika	31
Su šalimi susijusi informacija	33
Techninė priežiūra ir garantija	34

ĮŽANGA

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokią kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.



Prietaisas gali atrodyti ne visai taip, kaip pavaizduota šių instrukcijų pavyzdinėse iliustracijose. Pasilieiname teisę atlikti bet kokius mūsų manymu būtinus pakeitimus.

JŪSŲ KLAUSOS APARATAI



Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

PRIETAISO TIPAS

Jūsų klausos aparatai yra su įlandiniu garsiakalbiu (RIC). Imtuvas yra įdedamas į ausies kanalą ir sujungiamas su prietaisu imtuvo laidu. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologinės funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

Jūsų klausos aparatuose veikia Bluetooth® Low Energy* technologija, leidžianti keistis duomenimis naudojant išmanųjį telefoną ir sklandžiai transliuoti garsą naudojant iPhone** ir kai kuriems „Android“ išmaniesiems telefonams, kuriuose palaikoma technologija „Audio Streaming for Hearing Aids“ (ASHA).

* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks tokių „WS Audiology Denmark A/S“ ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

** „iPad“, „iPhone“ ir „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

SUSIPAŽINIMAS SU KLAUSOS APARATU


Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir atkreipkite dėmesį, kurioje aparato vietoje jie yra. Dėl to, kai nešiosite klausos aparatą, valdiklius galėsite apčiuopti ir paspausti lengviau.

i

Jeigu įsidėjęs klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, aparatą galite valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle. Naudodamiesi specialia išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

SUDEDAMOSIOS DALYS IR PAVADINIMAI

Šiame naudotojo vadove aprašyta keletas klausos aparatų tipų. Naudokitės toliau pateiktais paveikslėliais, kad nustatytumėte, kurį klausos aparato tipą naudojate.

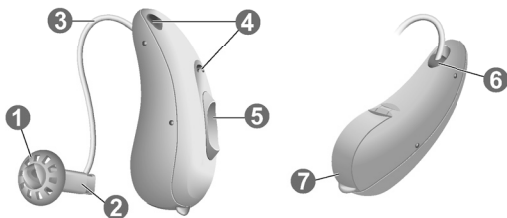

-
- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Į ausį kišama dalis | 5 Svirtinis jungiklis (valdiklis) |
| 2 Imtuvas | 6 Pusės indikatorius
(raudonas = dešinioji ausis,
mėlynas = kairioji ausis) ir
imtuvo jungtis |
| 3 Imtuvo kabelis | |
| 4 Mikrofono angos | 7 Maitinimo elementų skyrius
(įjungimo /
išjungimo jungiklis) |
-

Galite naudoti toliau išvardytas standartines į ausį kišamas dalis.


Standartinės į ausį kišamos dalys		Dydis
		Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power
		Eartip 3.0 Open
		Eartip 3.0 Tulip

Standartinės į ausį kišamas dalis galite lengvai pakeisti. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys	
	 Ausies įdėklas 3,0

VALDIKLIAI

Klavišiniu jungikliu galite, pavyzdžiui, reguliuoti garsumą arba perjunginėti klausos programas. Klausos specialistas užprogramavo klavišiniam jungikliui jūsų pageidautas funkcijas.

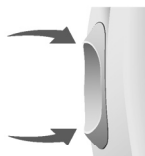

Klavišinio jungiklio funkcijos	L	R
Paspauskite trumpai:		
Programa aukštyn / žemyn	☐	☐
Garsumo didinimas / mažinimas	☐	☐
Spengimo ausyse funkcijos didinimas / mažinimas	☐	☐
TV transliacija įjungta / išjungta	☐	☐
Laikykite nuspaudę apie 2 sekundes:		
Programa aukštyn / žemyn	☐	☐
Garsumo didinimas / mažinimas	☐	☐
Spengimo ausyse funkcijos didinimas / mažinimas	☐	☐
TV transliacija įjungta / išjungta	☐	☐
Laikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes:		
Budėjimo rež. / įjungimas	☐	☐

L = kairė, R = dešinė



Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį klausos programoms keisti ir klausos aparatų garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

KLAUSOS PROGRAMOS

1

2

3

4

5

6

Daugiau informacijos žr. skyriuje „Klausos programos keitimas“.

FUNKCIJOS



Pasirinkus funkciją **įjungimo delsa**, dedant klausos aparatą į ausį negirdimi švilpimo garsai.

Daugiau skaitykite skyriuje „Įjungimas ir išjungimas“.



Ūžesio šalinimo funkcija sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.

MAITINIMO ELEMENTAI

Kai maitinimo elementas senka, garsas tampa silpnesnis arba pasigirsta įspėjamasis signalas. Nuo maitinimo elemento tipo priklauso, kiek ilgai galėsite jį naudoti.

PATARIMAI DĖL MAITINIMO ELEMENTŲ DYDŽIO IR NAUDOJIMO

Apie rekomenduojamus maitinimo elementus teiraukitės savo klausos specialisto.

Maitinimo elementų dydis:	312
---------------------------	-----

- Klausos aparatams visada naudokite tinkamo dydžio maitinimo elementus.
- Jeigu nenaudosite klausos aparatų keletą dienų, išimkite maitinimo elementus.
- Su savimi visada turėkite atsarginių maitinimo elementų.
- Iškvotus maitinimo elementus nedelsdami išimkite ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų perdirbimo taisyklių.


ELEMENTŲ KEITIMAS

Maitinimo elemento išėmimas:

- Atidarykite maitinimo elemento skyrių.



- Ištraukite maitinimo elementą, naudodami magnetinę lazdelę. Magnetinę lazdelę galima įsigyti kaip priedą.

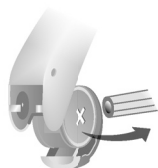

Maitinimo elemento įdėjimas:

- jei maitinimo elementas yra su apsaugine plėvele, ją nuimkite tik tada, kai būsite pasirengę naudoti maitinimo elementą.
- Įdėkite maitinimo elementą taip, kad „+“ simbolis būtų nukreiptas aukštyn į maitinimo elemento dureles (žr. paveikslėlį).



Pastaba. Nedėkite maitinimo elemento tiesiai į korpusą.

- Atsargiai uždarykite maitinimo elemento skyrių. Jei jaučiate pasipriešinimą, maitinimo elementas įdėtas neteisingai.

Maitinimo elemento skyriaus nebandykite uždaryti naudodami jėgą. Galite jį sugadinti.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Kad klausos aparatais būtų patogų ir paprastą naudotis, jie turi integruotą valdymo elementą. Be to, siūlome „Android“ ir „iPhone“ programėlę, kuri leidžia dar lengviau valdyti įrenginius. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti išmaniojo telefono programėlę, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite naudodami maitinimo elemento skyrių:

- ▶ Įjungimas: uždarykite maitinimo elementų skyrių.
Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.
- ▶ Išjungimas: Atidarykite maitinimo elemento skyrių iki pirmo sklėsčio.

Galite pasirinkti, kad būtų girdimas signalas, kai nešiojant klausos aparatą jis įjungiamas arba išjungiamas.

Įjungus funkciją **Power-on delay** (įjungimo delsa), klausos aparatai įsijungia tik po kelių sekundžių. Per tą laiką įsidedant į ausis klausos aparatus nėra nemalonaus švilpimo garso.

Funkciją „Power-on delay“ (įjungimo delsa) gali įjungti klausos specialistas.

BUDĖJIMO REŽIMO ĮJUNGIMAS

Prietaiso budėjimo režimą galite įjungti šiais būdais:

- naudodami nuotolinio valdymo pultelį arba išmaniojo telefono programėlę;
- naudodami klavišinį jungiklį.

Įjungimas arba išjungimas:

klavišinį jungiklį nuspauskite ir palaikykite kelias sekundes. Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Įjungus budėjimo režimą prietaisas nutildomas. Išėjus iš budėjimo režimo, nustatomas **anksčiau** naudotas garsumas ir klausos programa.

Pastaba.

- Veikiant budėjimo režimui, prietaisas nėra visiškai išjungtas. Jis naudoja šiek tiek energijos. Todėl budėjimo režimą rekomenduojame naudoti tik trumpai.
- Jei norite palikti įjungtą budėjimo režimą, tačiau šalia neturite nuotolinio valdymo pultelio arba programėlės, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą (atidarydami ir uždarydami maitinimo elemento skyrių). Tokiu atveju nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

KLAUSOS APARATŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:


- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.




Klausos aparato įdėjimas:

- Naudodami Sleeves pasirinkite, kad Sleeve sulenkimas sutaptų su imtuvo laido sulenkimu. Žr. iliustracijas kitame puslapyje.

Teisingai:

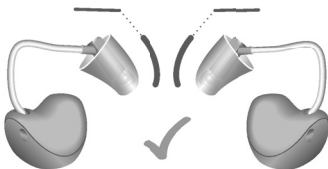


Neteisingai:

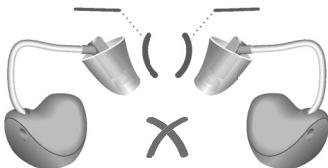

- ▶ Laikykite imtuvo laidą už linkio arčiau į ausį kišamos dalies.
- ▶ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ❶.
- ▶ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ❷.

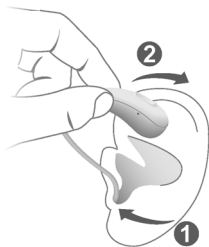

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Imtuvo laidą visada naudokite su ausies antgaliu.
- ▶ Įsitikinkite, kad į ausį kišama dalis yra gerai pritvirtinta.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.

i

- Gali būti patogiau **dešinijį** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairijį** – **kairiąja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.

Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Kaip pritvirtinti pasirinktinę prilaikymo juostelę:

- Sulygiuokite prilaikymo juostelę su plokščiuoju imtuvo galu.



- Tada spauskite prilaikymo juostelę link imtuvo, kol ji spragtelės ir užsifiksuos.




Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies ildubos dugną (žr. paveikslėlyje).



Klausos aparato išėmimas:

- Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ❶.
- Jeigu naudojate klausos aparatą su pritaikytu įdėklui arba forma, jį arba ją išimkite traukdami link pakaušio už mažo išimti skirto laidelio.
- Naudodami bet kokias kitas į ausį kišamas dalis: Ausies kanale esantį imtuvą suimkite dviem pirštais ir atsargiai ištraukite ❷.

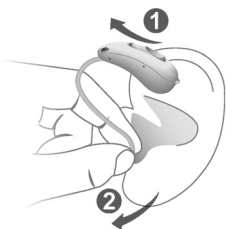

Netraukite imtuvo laido.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir išdžiovinkite. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

GARSUMO NUSTATYMAS

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- Jeigu pageidaujate reguliuoti garsumą rankiniu būdu, paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

KLAUSOS PROGRAMOS KEITIMAS

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- Jei norite pakeisti klausos programą, paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

KITI REGULIUOJAMI NUSTATYMAI (PASIRINKTINAI)

Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užesio funkcijos lygiui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

YPATINGOS KLAUSYMOSI SĄLYGOS

KALBANT TELEFONU

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.



KALBĖJIMO TELEFONU PROGRAMA

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.

GARSO TRANSLIACIJA NAUDOJANT „IPHONE“

Jūsų klausos aparatai yra Made for iPhone klausos aparatai. Tai reiškia, kad naudodami klausos aparatus galite atsiliiepti į skambučius ir klausytis muzikos iš „iPhone“.

Norėdami daugiau informacijos apie su iOS suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

GARSO TRANSLIACIJA NAUDOJANT „ANDROID“ TELEFONĄ

Jei jūsų mobilusis telefonas palaiko Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA), naudodami klausos aparatus galite atsiliepti į skambučius ir klausytis muzikos iš savo mobiliojo telefono.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie su „Android“ suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

BLUETOOTH

Jūsų įrenginys turi Bluetooth®* belaidę technologiją, kad būtų galima įjungti srautinį garso perdavimą iš mobiliųjų telefonų ar kitų suderinamų įrenginių.

Lėktuve Bluetooth funkcionalumas gali būti apribotas, ypač kilimo ir tūpimo metu. Tokiu atveju galite išjungti prietaiso Bluetooth belaidę technologiją naudodami išmaniojo telefono programėlę.

* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks tokių „WS Audiology Denmark A/S“ ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

TECHNINIS APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

KLAUSOS APARATAI

DŽIOVINIMAS IR LAIKYMAS

- ▶ Leiskite savo klausos aparatams nudžiūti per naktį.
- ▶ Kai klausos aparatų nenaudojate ilgesnį laiką, laikykite juos sausoje patalpoje, atidarę maitinimo elementų skyrių ir išėmę maitinimo elementus.
- ▶ Jei reikia daugiau informacijos, klauskite klausos specialisto.

VALYMAS

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniau ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkitė prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.



- Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiujų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.

Į AUSĮ KIŠAMOS DALYS


VALYMAS

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

Naudodami bet kokio tipo į ausį kišamas dalis:

- Išėmę į ausį kišamas dalis, nedelsdami nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.


Taip ausų sierra neprisidžius.

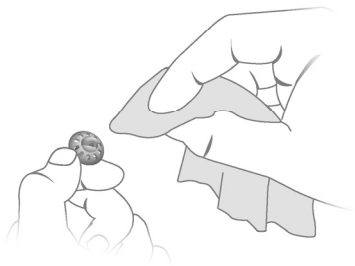


KEITIMAS

Standartinės į ausį kišamas dalis keiskite maždaug kas tris mėnesius. Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, pakeiskite anksčiau. Standartinių į ausį kišamų dalių keitimo procedūra priklauso nuo į ausį kišamos dalies tipo. Skyriuje „Sudedamosios dalys ir pavadinimai“ jūsų klausos specialistas pažymėjo jūsų naudojamos į ausį kišamos dalies tipą.

- Norėdami nuimti seną į ausį kišamą antgalį arba Sleeve, vadovaukitės toliau pateikiama iliustracija. Saugokitės, kad netrauktumėte imtuvo laido.

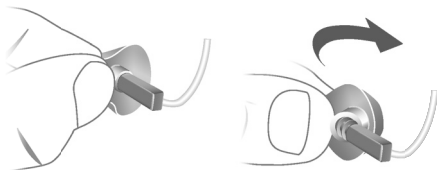

- Pasirūpinkite, kad naujas į ausį kišamas antgalis arba Sleeve visiškai padengtų imtuvo fiksuojamuosius žiedus.
- Patikrinkite, ar naujas į ausį kišamas antgalis arba Sleeve tvirtai užsifiksavo.

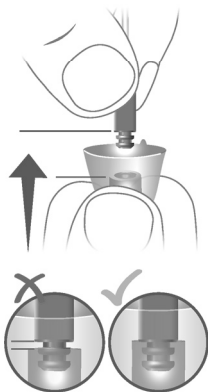

SPECIALISTŲ ATLIEKAMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis ir ausų sieros filtrus prireikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų rekomendacijos jums dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

TOLESNĖ INFORMACIJA

INFORMACIJA SAUGOS KLAUSIMAIS

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridėdamą saugos instrukciją.

PRIEDAI

Galite naudoti programėlę smartphone app, su kuria galite savo klausos aparatus patogiai valdyti nuotoliniu būdu. Naudodami programėlę taip pat galite išjungti signalinius tonus, kurti asmeninius garso profilius ir atlikti daugelį kitų funkcijų.

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

Mūsų dokumentuose naudojami simboliai



Nurodoma situacija, kai gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą žalą nuosavybei.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.



CE atitikties žyma, patvirtinanti tam tikrų Europos direktyvų atitiktį, žr. skyrių „Atitikties informacija“.

Mūsų dokumentuose naudojami simboliai



Nurodo teisėtą prietaiso gamintoją.

Made for

iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ ir „Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų atitiktį. Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio veikimą.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Pagarsinkite.
- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
- Pritildykite.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

Garsas iškraipomas.

- Pritildykite.
- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
- Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.

Klausos aparatas neveikia.

- Įjunkite klausos aparatą.
- Atsargiai iki galo uždarykite maitinimo elemento skyrių.
- Pakeiskite išseikvotą maitinimo elementą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo elementas įdėtas taisyklingai.
- Įjungta įjungimo delsa. Palaukite keletą sekundžių ir patikrinkite dar kartą.

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

SU ŠALIMI SUSIJUSI INFORMACIJA

JAV IR KANADA

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

BiCore R312

- HVIN: RFM003
- Yra FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Sudėtyje yra IC: 26428-RFM003

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA

Serijos numeriai	Aparatas	Imtuvas
Kairė:		
Dešinė:		
Techninės priežiūros datos		
1:	4:	
2:	5:	
3:	6:	
Garantija		
Įsigijimo data:		
Garantinis laikotarpis mėnesiais:		
Jūsų klausos specialistas		

 **Teisėtas gamintojas**

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lynge

Danija

Document No. 04926-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 210 223 70

Master Rev01, 12.2021

© 05.2022, WSAUD A/S. All rights reserved

www.rexton.com

CE
0123