

Reach iX-CIC Li

NAUDOTOJO VADOVAS



REXTON

TURINYS

Sveiki!	4
Jūsų klausos aparatai	5
Klausos aparato tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	5
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	6
Klausos programos	7
Funkcijos	7
Kasdienis naudojimas	8
Įkrovimas	8
Klausos aparatų įjungimas ir išjungimas	8
Budėjimo režimo įjungimas	9
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	10
Garsumo reguliavimas	13
Klausos programos keitimas	14
Ypatingos klausymosi sąlygos	15
Kalbant telefonu	15
Dažniausiai užduodami klausimai	16

Techninis aptarnavimas ir priežiūra	18
Valymas	18
Džiovinimas	19
Laikymas	19
Į ausį kišamos dalys	20
Specialistų atliekama techninė priežiūra	23
Svarbi informacija apie saugą	24
Saugos informacija apie įkraunamus ličio jonų maitinimo elementus	24
Klausos aparatų saugos informacija	25
Tolesnė informacija	26
Priedai	26
Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos	26
Informacija apie įrenginio likvidavimą	28
Šiame dokumente naudojami simboliai	28
Trikčių diagnostika	29
Su šalimi susijusi informacija	30
Techninė priežiūra ir garantija	31

SVEIKI!

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokią kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos priežiūros specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



Prietaisas gali atrodyti ne visai taip, kaip pavaizduota šių instrukcijų pavyzdinėse iliustracijose. Pasilieiname teisę atlikti bet kokius mūsų manymu būtinus pakeitimus.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.



Prieš pirmą kartą naudodami klausos aparatus, juos visiškai įkraukite. Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais.

JŪSŲ KLAUSOS APARATAI

i

Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

KLAUSOS APARATO TIPAS

Jūsų klausos aparatai dėvimi išorinėje ausyje. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Į jūsų klausos aparatą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Dėl to prietaisą paprasta įkrauti jūsų įkrovikliu.


Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologines funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

SUSIPAŽINIMAS SU KLAUSOS APARATU

Norėdami naudotis nuotolinio valdymo funkcijomis, atsisiųskite išmaniojo telefono programėlę (Rexton App).

Galite pasiteirauti savo klausos specialisto dėl kito nuotolinio valdymo pultelio.

SUDEDAMOSIOS DALYS IR PAVADINIMAI

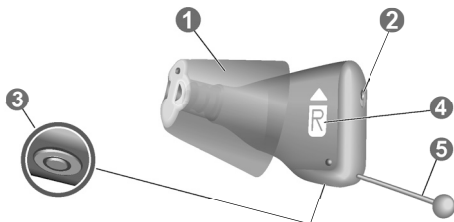

- | | |
|-----------------------|--|
| ➊ Į ausį kišama dalis | ➋ Pusės indikatorius
(R = dešinioji ausis,
L = kairioji ausis) |
| ➌ Mikrofono anga | |
| ➍ Krovimo kontaktai | ➎ Išėmimo virvutė |

Galite naudoti toliau išvardytas standartines į ausį kišamas dalis:

Standartinės į ausį kišamos dalys		Dydis
☐		Sleeve 3.0 Vented/Closed/Power
☐		Eartip 3.0 Open(pasirinktinai)
☐		Eartip 3.0 Tulip(pasirinktinai)

Standartinės į ausį kišamas dalis galite lengvai pakeisti. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys



Ausies įdėklas 3,0

KLAUSOS PROGRAMOS

1

2

3

4

5

6

Daugiau informacijos žr. skyriuje
„Klausos programos keitimas“.

FUNKCIJOS




Ūžesio terapijos funkcija sukuria garsą, kad
ūžesys jūsų nebevargintų.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

ĮKROVIMAS

Įkraukite klausos aparatus naudodami IF CIC Travel Charger. Vadovaukitės įkroviklio naudojimo vadove pateiktais nurodymais, kur rasite naudingų patarimų, kaip įkrauti.

Kaip parodyta, savo klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

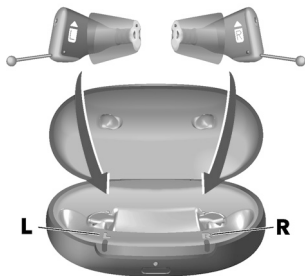

KLAUSOS APARATŲ ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

- ▶ Įjungimas: Išimkite aparatus iš įkroviklio.

Jūsų klausos aparate leidžiama paleidimo melodija. Nustatomas **numatytasis** garsumas ir girdėjimo programa.

- ▶ Išjungimas: Klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

Atminkite, kad įkroviklis turi būti įjungtas.

BUDĖJIMO REŽIMO ĮJUNGIMAS

Nuotolinio valdymo pultu klausos aparatus galite perjungti į budėjimo režimą. Taip klausos aparatai nutildomi. Išėjus iš budėjimo režimo, nustatomas **anksčiau** naudotas garsumas ir klausos programa.

Pastaba:

- Veikiant budėjimo režimui, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungti. Jie vartoja šiek tiek energijos.

Todėl budėjimo režimą rekomenduojame naudoti tik trumpai.

- Jei norite išeiti iš budėjimo režimo, bet nuotolinio valdymo pulto naudoti negalite: Klausos aparatus išjunkite ir vėl įjunkite trumpai įdėdami į įkroviklį, kol užsidegs viena arba daugiau LED lempučių. Palaukite, kol klausos aparatuose pradės skambėti paleidimo melodija. Tai gali užtrukti kelias sekundes. Atminkite, kad nustatytas **numatytasis** garsumas ir klausymo programa.

KLAUSOS APARATŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS




PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!


- ▶ Klausos aparatą visada naudokite su į ausį kišama dalimi.
- ▶ Įsitikinkite, kad į ausį kišama dalis yra gerai pritvirtinta.

Klausos aparato įdėjimas:

- ▶ Išsiaiškinkite, kuris klausos aparatas yra dešinysis, o kuris kairysis, kad įdėtumėte jį į tinkamą ausį. Klausos aparato spalva arba ženklavimas nurodo puses:
raudona spalva arba įspausta „R“ = dešinioji ausis
mėlyna spalva arba įspausta „L“ = kairioji ausis
- ▶ Pasirūpinkite, kad Sleeve skydelis būtų nukreiptas į ant klausos aparato išspausdintą liniją.

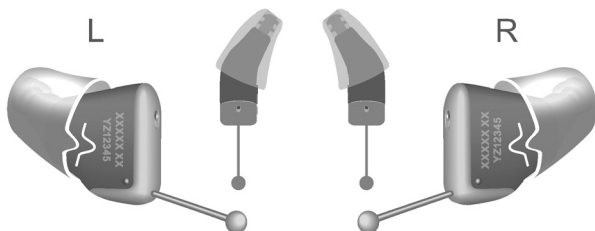

- Prieš dėdami klausos aparatą paimkite jį tinkama padėtimi. Atkreipkite dėmesį į ištraukimo laidą, nurodantį apačią. Ant klausos aparato atspausdinta rodyklė turi būti nukreipta į viršų.

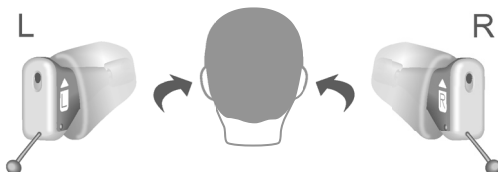

- Atsargiai įstumkite klausos aparatą į ausies kanalą.



- Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.





PERSPĒJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Ausies antgalī kišķite ī ausī atsargiai, ne per giliai.



- Gali būti patogiau **dešinījī** klausos aparatā dēti **dešiniāja** ranka, o **kairījī** – **kairiāja**.
- Jeigu klausos aparats sunkiai lenda ī ausī, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelī žemyn. Ausies kanālas taps atviresnis ir īstumti klausos aparatā bus lengviau.

Klausos aparato īšētimas:

- ▶ Šiek tiek spustelēkite ausī īš galo, kad atlaisvintumēte klausos aparatā.
- ▶ Įšimkite klausos aparatā traukdami jī pakaušio link uż īšēmimo virvutēs.



PERSPĒJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Labai retais atvejais īšimant klausos aparatā ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitēs ī medicīnos specialistā, kad jīs īštrauktū ausies antgalī.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir īšdžiovinkite. Daugiau informācijas žr. skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

GARSUMO REGULIAVIMAS

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- Jei pageidaujate garsumą reguliuoti neautomatiškai, naudokite nuotolinio valdymo parinktį.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas.

KLAUSOS PROGRAMOS KEITIMAS

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- Norėdami pakeisti klausos programą rankiniu būdu naudokite nuotolinį valdymo pultelį.

Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

YPATINGOS KLAUSYMOSI SĄLYGOS

KALBANT TELEFONU

Kalbėdami telefonu šiek tiek pakreipkite ragelį, kad jis visiškai neuždengtų jūsų ausies.



KALBĖJIMO TELEFONU PROGRAMA

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Jums gali kilti klausimų, kaip geriausia įkrauti klausos aparatus. Perskaitykite toliau pateiktus klausimus ir atsakymus. Jei turite daugiau klausimų, jums padės klausos priežiūros specialistas.



Kodėl mano klausos aparatai neįsijungia, išėmus juos iš įkroviklio?

Patikrinkite, ar:

- Įkroviklis yra išjungtas. Norėdami įkroviklį įjungti nuspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes. Žr. skyrių „Įkroviklio įjungimas arba išjungimas“.
- Vidinis įkroviklio maitinimo elementas per mažai įkrautas. Prijunkite įkroviklį prie elektros lizdo.

Dabar išimkite klausos aparatus iš įkroviklio.



Kaip išjungti klausos aparatus jų neįkrovus?

- ▶ Klausos aparatus įdėkite į įkroviklį. Įsitikinkite, kad jie tinkamai įstatyti (užsidega būsenos LED lempučių). Klausos aparatai automatiškai išjungiami ir pradedami krauti.
- ▶ Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo.
- ▶ Norėdami įkroviklį išjungti nuspauskite mygtuką ir palaikykite 5 sekundes. Įkrova sustabdoma.



Į ką reikėtų atkreipti dėmesį įkraunant?

Klausos aparatai ir įkroviklis turi būti švarūs bei sausi. Laikykitės naudojimo sąlygų, nurodytų skyriuje „Eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“. Venkite krauti esant aukštai temperatūrai, nes gali sumažėti maitinimo elemento eksploatavimo trukmė ir pajėgumas.

Jei klausos aparatus arba įkroviklį naudojate labai šiltoje aplinkoje, atminkite, kad įkroviklio temperatūrai viršijus 42 °C (107 °F) jis nustos krauti. Vėsinimo režimo metu klausos aparatų ir (arba) įkroviklio LED lempučių pulsuos oranžine spalva. Krovimas atnaujinamas automatiškai, kai prietaisas atvėsta. Kol LED lempučių pulsuoja žaliai, nelieskite klausos aparatų, nes jie gali būti įkaitę.

TECHNINIS APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

VALYMAS

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniai ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.
- ▶ Nevalykite įkrovimo kontaktų alkoholio pagrindo skiedikliu.
- ▶ Kad išvengtumėte korozijos naudokite minkštą ir sausą servetėlę prakaitui ar skysčiui nušluostyti nuo įkrovimo kontaktų arba klausos aparatų prieš įstatydami juos į įkroviklį.
- ▶ Kreipkitės į klausos specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiosios priežiūros rinkinių arba paieškokite išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti tinkamą klausos aparatų būklę.





PASTABA

- ▶ Jeigu retais atvejais ant įkrovimo kontaktų pamatytumėte korozijos požymius ir jų nepavyktų pašalinti, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į klausos specialistą.

DŽIOVINIMAS

Savo klausos aparatams džiovinti galite naudoti įprastus produktus. Dėl rekomenduojamų džiovinimo produktų ir asmeninių nurodymų, kada džiovinti klausos aparatus, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

LAIKYMAS

- Trumpalaikis laikymas nenaudojant (iki kelių dienų). Išjunkite klausos aparatus įdėdami juos į įkroviklį.

Įkroviklis turi būti įjungtas. Jei įkroviklis neįjungtas ir į jį įdedate klausos aparatus, jie **neišjungiami**.

Atkreipkite dėmesį, kad kai klausos aparatus išjungiate nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle, klausos aparatai nėra **visiškai** išjungiami. Jie veikia budėjimo režimu ir vis dar vartoja šiek tiek energijos.

- Ilgalaikis laikymas nenaudojant (savaites, mėnesius ir t. t.). Pirmiausia savo klausos aparatus visiškai įkraukite. Palikite juos įkroviklyje ir uždarykite dangtelį. Kai klausos aparatai visiškai įkraunami, įkroviklis ir klausos aparatai išjungiami automatiškai.

Jei klausos aparatai yra nenaudojami ir laikomi, rekomenduojame naudoti džiovinimo produktus.

Jei klausos aparatus laikysite ilgiau nei 3 mėnesius, įdėkite juos į įkroviklį ir įsitikinkite, kad įkroviklis išjungtas.

Laikykitės laikymo sąlygų, nurodytų skyriuje „Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.


Į AUSĮ KIŠAMOS DALYS

VALYMAS

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

- Išėmę į ausį kišamas dalis, nedelsdami nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.


Taip ausų siera neprisidžius.

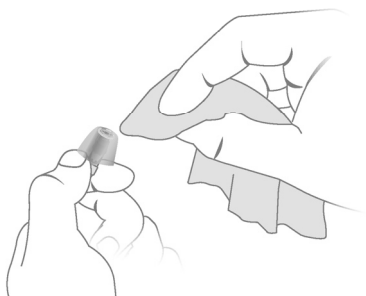


KEITIMAS

Standartinės į ausį kišamos dalis keiskite maždaug kas tris mėnesius. Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, pakeiskite anksčiau. Standartinių į ausį kišamų dalių keitimo procedūra priklauso nuo į ausį kišamos dalies tipo. Skyriuje „Sudedamosios dalys ir pavadinimai“ jūsų klausos specialistas pažymėjo jūsų naudojamos į ausį kišamos dalies tipą.

- Norėdami nuimti seną į ausį kišamą antgalį arba Sleeve, vadovaukitės toliau pateikiama iliustracija.

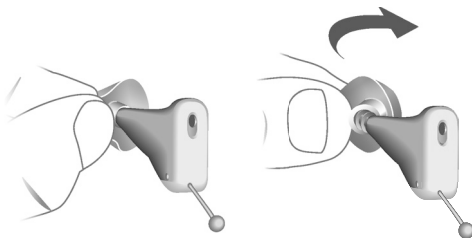


- Pasirūpinkite, kad naujas į ausį kišamas antgalis arba Sleeve visiškai padengtų imtuvo fiksuojamuosius žiedus.
- Patikrinkite, ar naujas į ausį kišamas antgalis arba Sleeve tvirtai užsifiksavo. Į ausį kišamas antgalis arba Sleeve priglunda tinkamai, kai matoma apsauga nuo vaško.

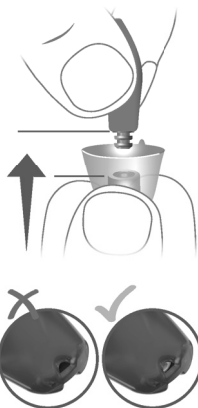


- Montuodami naujajį į ausį kišamą antgalį arba Sleeve pasirūpinkite, kad į ausį kišamo antgalio arba Sleeve skydelis būtų nukreiptas į ant įrenginio išspausdintą liniją.

teisingai

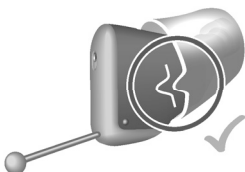

neteisingai

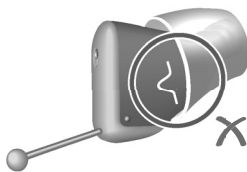

SPECIALISTŲ ATLIEKAMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Klausos priežiūros specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą bei atlikti techninę priežiūrą.

Pasiteiraukite savo klausos priežiūros specialisto individualių rekomendacijų dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ

SAUGOS INFORMACIJA APIE ĮKRAUNAMUS LIČIO JONŲ MAITINIMO ELEMENTUS



ĮSPĖJIMAS

Į jūsų prietaisą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Netinkamai naudojant prietaisą, įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas gali sprogti.

Sužeidimo, gaisro arba sprogimo pavojus!

► Laikykitės šiame skyriuje pateiktų įkraunamų ličio jonų maitinimo elementų saugos nurodymų.

- Laikykitės naudojimo sąlygų. Žr. skyrių „Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.
- Būkite itin atidūs ir prietaisą saugokite nuo didelio karščio (pvz., ugnies, mikrobangų krosnelės, indukcinės krosnelės ir kitų didelės indukcijos laukų) bei saulės šviesos.
- Klausos aparatus kraukite tik patvirtintu įkrovikliu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.
- Prietaiso neardykite.
- Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje.
- Nenaudokite deformuotų ar aiškiai pažeistų prietaisų.

- Nenaudokite prietaiso, jei įkrovus akivaizdžiai sumažėja jo efektyvumas. Grąžinkite prietaisą savo klausos priežiūros specialistui.
- Neišmeskite prietaiso į ugnį arba vandenį.

Keitimo ir remonto darbus turi atlikti specialistas. Todėl:

- Neremontuokite ir nekeiskite įkraunamo ličio jonų maitinimo elemento patys.
- Jei mažai tikėtinu atveju įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas sprogtų, visas degias medžiagas laikykite atokiau.

Visais pirmiau paminėtais atvejais grąžinkite prietaisą klausos priežiūros specialistui.

KLAUSOS APARATŲ SAUGOS INFORMACIJA

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridėdamą saugos instrukciją.

TOLESNĖ INFORMACIJA

PRIEDAI

Galimų priedų tipas priklauso nuo klausos aparato tipo. Pavyzdžiui: nuotolinio valdymo pultas, garso transliavimo įrenginys arba valdyti nuotoliniu būdu skirta išmaniojo telefono programėlė.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

NAUDOJIMO, TRANSPORTAVIMO IR LAIKYMO SĄLYGOS

Atminkite, kad klausos aparatus reikia įkrauti bent kas 6 mėnesius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Eksplotavimo sąlygos	Iškrovimas	Įkrovimas
Temperatūra	Nuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 122 °F)	Nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 95 °F)
Santykinis drėgnis	5–93 %	5–93 %
Atmosferos slėgis	Nuo 700 iki 1060 hPa	Nuo 700 iki 1060 hPa

Jeigu transportavimas ir laikymas trunka ilgai, atsižvelkite į toliau nurodytas sąlygas.

	Laikymas	Transportavimas
Temperatūra (rekomenduojama)	Nuo 10 iki 25 °C (nuo 50 iki 77 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Temperatūra (didžiausias diapazonas)	Nuo 10 iki 40 °C (nuo 50 iki 104 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Santykinis drėgnis (rekomenduojama)	Nuo 20 iki 80 %	Nuo 5 iki 90 %
Santykinis drėgnis (didžiausias diapazonas)	Nuo 10 iki 80 %	Nuo 5 iki 90 %
Atmosferos slėgis	Nuo 700 iki 1060 hPa	Nuo 700 iki 1060 hPa



ĮSPĖJIMAS

Pervežant atsiranda sužeidimo, gaisro arba sprogo pavojaus.

- ▶ Ličio baterijas ir klausos aparatus pervežkite laikydamiesi vietinių reikalavimų.

INFORMACIJA APIE ĮRENGINIO LIKVIDAVIMĄ



PASTABA

- ▶ Kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite maitinimo elementų, klausos aparatų ar įkroviklio kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
- ▶ Maitinimo elementus, klausos aparatus ar įkroviklį perdirbkite ar išmeskite laikydamiesi vietinių nuostatų.

ŠIAME DOKUMENTE NAUDOJAMI SIMBOLIAI

Simboliai ant prietaiso ar pakuotės



Nurodoma situacija, kai gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą žalą nuosavybei.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.



CE atitikties žyma, patvirtinanti tam tikrų Europos direktyvų atitiktį, žr. skyrių „Atitikties informacija“.



Nurodo teisėtą prietaiso gamintoją.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Pagarsinkite.
 - Įkraukite klausos aparatą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaisys.
 - Pritildykite.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Garsas iškraipomas.

- Pritildykite.
 - Įkraukite klausos aparatą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Įkraukite klausos aparatą.
-

Klausos aparatas neveikia.

- Įjunkite klausos aparatą.
 - Įkraukite klausos aparatą. Taip pat stebėkite įkroviklio būsenos LED diodus.
-

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

SU ŠALIMI SUSIJUSI INFORMACIJA

JAV IR KANADA

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

Reach iX-CIC Li

Modelis: MIM003

- Yra FCC ID: 2AXDT-MIM003
- Yra IC: 26428-MIM003

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA

Serijos numeriai

Kairė:

Dešinė:

Techninės priežiūros datos

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantija

[sigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

Jūsų klausos specialistas



Teisėtas gamintojas

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Danija

Document No. 05644-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 210 365 70

Master Rev01, 10.2023

www.wsaud.com

© 01.2024, WSAUD A/S. All rights reserved

www.rexton.com

